



COCCON

C r y o t e c h n o l o g y

CRYOTECHNOLOGY

CRYOTECHNOLOGY je přístroj pro eliminaci tukových buněk prostřednictvím chladu. Tato technika je obecně známá jako kryolipolýza.

Jedná se o bezbolestné neinvazivní ošetření, při kterém dochází ke zchlazení tukové vrstvy velmi efektivním způsobem. Zmražené adipocyty jsou následně vyplaveny z těla přirozeným způsobem.



Jak přístroj CRYOTECHNOLOGY funguje?



Po zmražení adipocytů dojde k jejich rozpadu, aniž by byla narušena jiná tkáň. Jedná se o pozvolné lokální zmražení tukové tkáně, které má za následek eliminaci tukových buněk.

Adipocyty jsou postupně odplavovány do lymfatického systému.

Když jsou adipocyty vystaveny chladu, spustí se proces apoptózy a buňky jsou prostřednictvím metabolismu přirozeně eliminovány.

Proces destrukce tukových buněk


Přístroj **CRYOTECHNOLOGY** pracuje na bázi řízeného postupného zchlazování tukové vrstvy kůže.

Technika je zacílena pouze na tukovou tkáň, která je citlivá na změny teplot, na rozdíl od jiných tkání.


Účinky CRYOTECHNOLOGY

Výsledky ošetření přístrojem **CRYOTECHNOLOGY** jsou viditelné v rozmezí od 1 do 3 měsíců.


Mnohé studie prokázaly, že tuková vrstva v hlubších vrstvách kůže zůstává stejná, povrchový tuk je však zredukován až o 80% během 4 měsíců.

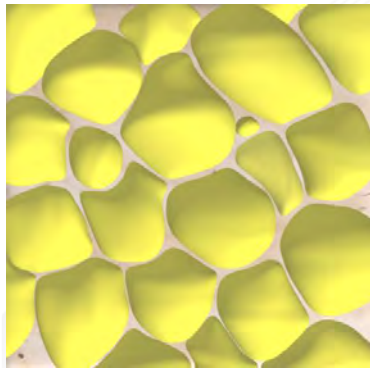

1 hodina po
ošetření

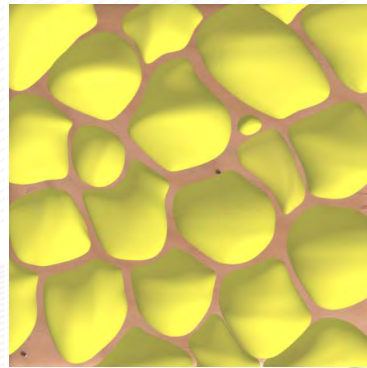


14 dní po
ošetření

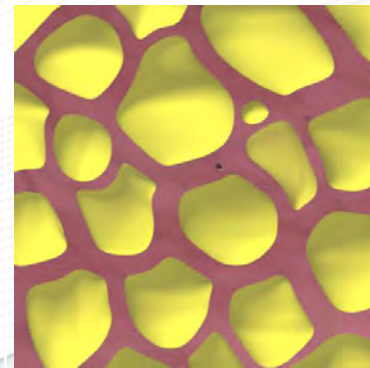

28 dní po
ošetření

Aplikátory CRYOTECHNOLOGY

Po aplikaci hlavice na ošetřovanou oblast dojde k nasátí tukové vrstvy a k jejímu oddělení od ostatních tkání. Ochlazením tukových buněk dojde k apoptóze, což je proces postupného odumírání buněk. Následně jsou buňky vyplaveny do lymfatického systému a vyloučeny z těla.

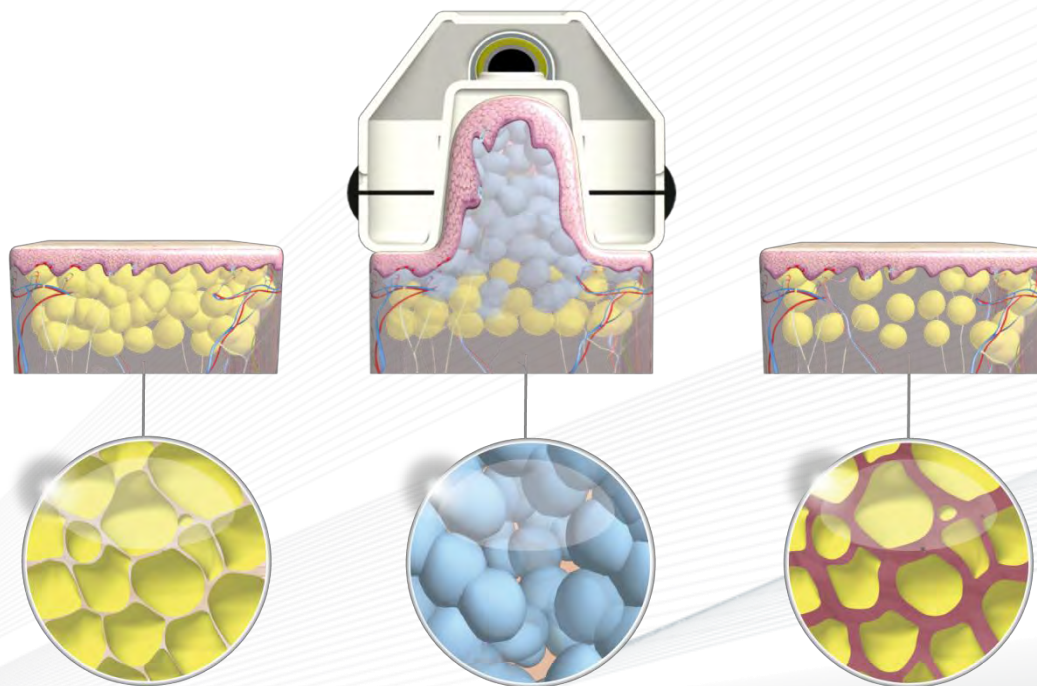

Aplikátory CRYOTECHNOLOGY

Přístroj CRYOTECHNOLOGY disponuje 2 hlavicemi, tzn. lze ošetřovat 2 zóny najednou, čímž je ošetření velmi rentabilní.



Díky dokonalému designu hlavic lze ošetřovat různé partie. Vnitřní strana hlavic je vyrobena z materiálu poslední generace.

Ošetření CRYOTECHNOLOGY



▣ Proces ošetření

- Očistit zónu, kterou budeme ošetřovat.
- Změřit tukovou vrstvu, popřípadě odhadnout.
- Navolit parametry ošetření.
- Vyznačit oblast ošetření.
- Klient by měl být během ošetření ve vhodné a pohodlné pozici.
- Na ošetřovanou zónu aplikovat protimrznoucí membránu
- Umístit aplikátor na ošetřovanou zónu a zmáčknout červený knoflík aplikátoru pro zahájení nasávání.

Ošetření CRYOTECHNOLOGY



Ošetření přístrojem Cryotechnology je neinvazivní a bezbolestné.

▣ Délka ošetření

Délka ošetření je různá v závislosti na velikosti a tloušťce ošetřované oblasti. Běžná délka ošetření je 45 minut.

▣ Doba mezi ošetřeními

Ošetření lze provádět každý 2. či 3. měsíc.

▣ Po ošetření

Po odstranění hlavice ošetřovanou oblast promasírujeme.

Po ukončení ošetření se klient může vrátit do běžného dne bez sebemenších komplikací.

Výhody CRYOTECHNOLOGY



- ▣ Přednastavené programy ošetření
- ▣ Disponuje 2 aplikátory pro nasávání; volitelné nastavení teploty a tlaku
- ▣ Individuální nastavení parametrů pro každého klienta
- ▣ Systém postupného nasávání během ošetření
- ▣ Aplikátory přístroje se dokonale přizpůsobí ošetřované oblasti
- ▣ Biokompatibilní materiál
- ▣ Grafický dotykový displej
- ▣ Český software

Software CRYOTECHNOLOGY



Úvodní menu

Software CRYOTECHNOLOGY



Obrazovka pro výběr pohlaví a partie ošetření.

Software CRYOTECHNOLOGY



Obrazovka pro nastavení parametrů ošetření.

Změří se tuková vrstva a naměřená hodnota se uvede do tabulky. Následně díky přednastavených programům přístroj vygeneruje vhodné hodnoty pro ošetření, které se dají modifikovat.

Software CRYOTECHNOLOGY



Obrazovka ošetření.

Po zadání hodnot ošetření se zobrazí veškeré nastavené údaje.

Následuje samotný proces ošetření.